

Stellen Sie folgende Punkte sicher, falls Ihr Arzt eine MRT-Untersuchung bei Ihnen anordnet:

- ✓ Informieren Sie den Arzt, der die MRT-Untersuchung angeordnet hat, dass bei Ihnen ein Rückenmarkstimulationssystem implantiert ist.
- ✓ Suchen Sie Ihren Implantatausweis. Wenn er verloren gegangen ist, wenden Sie sich an Ihr Nevro HFX-Therapieamt, um Ersatz anzufordern.

Vereinbarung Ihres MRT-Termins:

- ✓ Stellen Sie bei der Vereinbarung eines MRT-Termins der MRT-Einrichtung die nachstehenden Informationen bereit:
 - Dass Sie einen implantierten HFX Rückenmarksstimulator von Nevro haben
 - Ob bei Ihnen eventuell ein weiteres Medizinprodukt implantiert wurde
 - Eine ausführliche Beschreibung Ihres HFX Systems einschließlich Produktnummer, Elektroden und sonstiger Komponenten des Implantats (diese Informationen finden Sie auf Ihrem Implantatausweis)
 - Die Kontaktdaten des Arztes, der Ihr Gerät implantiert hat
 - Die MRT-Leitlinien von Nevro (unter [Nevro.com/manuals](https://www.nevro.com/manuals) abrufbar)
- ✓ Ihr Arzt und der medizinische Technologie für Radiologie (MTR) bestimmen anhand dieser Informationen, ob eine MRT-Untersuchung bei Ihnen sicher durchgeführt werden kann.

Vorbereitung auf Ihren MRT-Termin:

- ✓ Wenden Sie sich bitte an Ihr Nevro HFX-Therapieamt, um zu klären, ob Sie die MRT-Untersuchung ohne Bedenken durchführen lassen können.
- ✓ Vor der MRT-Untersuchung müssen Sie unter Anleitung Ihres HFX-Therapieamts Ihr Gerät in der HFX-App in den MRT-Modus versetzen.
 - Die schrittweisen Anweisungen finden Sie in der Kurzanleitung für HFX-App Patienten oder unter [NevroHFX.com/de/materialien/hfx-app/](https://www.NevroHFX.com/de/materialien/hfx-app/).




Stellen Sie sicher, dass Ihr HFX-Gerät vor der MRT-Untersuchung vollständig aufgeladen ist.

Bei Ihrem MRT-Termin:

- ✓ Bringen Sie Ihren Implantatausweis und Ihr Mobiltelefon mit der HFX-App zum MRT-Termin mit.
- ✓ Ihr MTR überprüft vor der MRT-Untersuchung, ob Sie sich im MRT-Modus befinden.

Nach Ihrem MRT-Termin:

- ✓ Tippen Sie nach der MRT-Untersuchung auf „MRT-Modus beenden“ und befolgen Sie die Aufforderungen in der HFX-App, um den MRT-Modus zu beenden und die Stimulation wieder auf EIN zu schalten.
- ✓ Bei Verwendung des manuellen Modus setzen Sie sich mit Ihrem Nevro HFX-Therapie team in Verbindung, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät wieder auf die Einstellungen vor der MRT-Untersuchung programmiert ist.

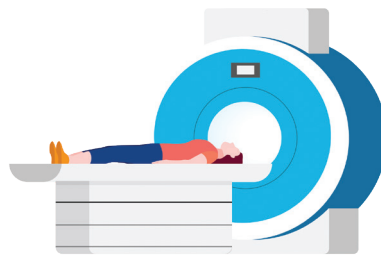

Sie benötigen Hilfe?

Bitte kontaktieren Sie Ihr Nevro HFX-Therapie team, das Ihnen dabei helfen kann, ein geeignetes Zentrum zu finden, die Informationen zusammenzutragen, die Sie benötigen und Ihre Fragen zu beantworten.



MRT-Leitlinien für den MT-R (medizinischen Technologen für Radiologie)

Scannen Sie den Code zum Aufrufen ausführlicher Informationen zur MRT-Kompatibilität oder besuchen Sie [Nevro.com/manuals](https://www.nevro.com/manuals).

Hinweis: HFX und HFX iQ sind unter bestimmten Bedingungen für MRT-Untersuchungen zugelassen. Unterschiedliche Implantatmodelle, einschließlich Elektrodentypen, sind mit verschiedenen zulässigen Scan-Bedingungen verknüpft. Lesen Sie die MRT-Leitlinien von Nevro gemeinsam mit Ihrem HFX-Therapie team gründlich durch, bevor Sie sich einer MRT-Untersuchung unterziehen.

HFX, das HFX Logo, HFX iQ, das HFX iQ Logo, NEVRO und das NEVRO Logo sind Markennamen oder eingetragenen Markennamen der Nevro Corp. ©2024 Nevro Corp. Alle Rechte vorbehalten.