

HFX™

Guida agli accessori



Come usare il dispositivo di prova



Come usare il telecomando

(PTRC3000/PTRC2500 - Telecomando a 5 programmi)



Come usare il telecomando

(PTRC2300 - Telecomando a 3 programmi)



Come usare il telecomando

(PTRC1000)



Come usare il caricabatterie

(CHGR2500)




Come usare il caricabatterie

(CHGR1000)

Come usare il dispositivo di prova Per pazienti in fase di prova

Lei userà il telecomando (PTRC3000) per modificare la stimolazione durante il periodo di prova.

1. Pulsante di accensione/spengimento del telecomando
2. Pulsante di disattivazione della stimolazione
3. Indicatore del livello della batteria (livello di carica del dispositivo di prova)
4. Indicatore del livello di stimolazione
5. Pulsante di avvio/aumento della stimolazione
6. Pulsante di riduzione della stimolazione
7. Indicatore del programma
8. Pulsante di selezione del programma

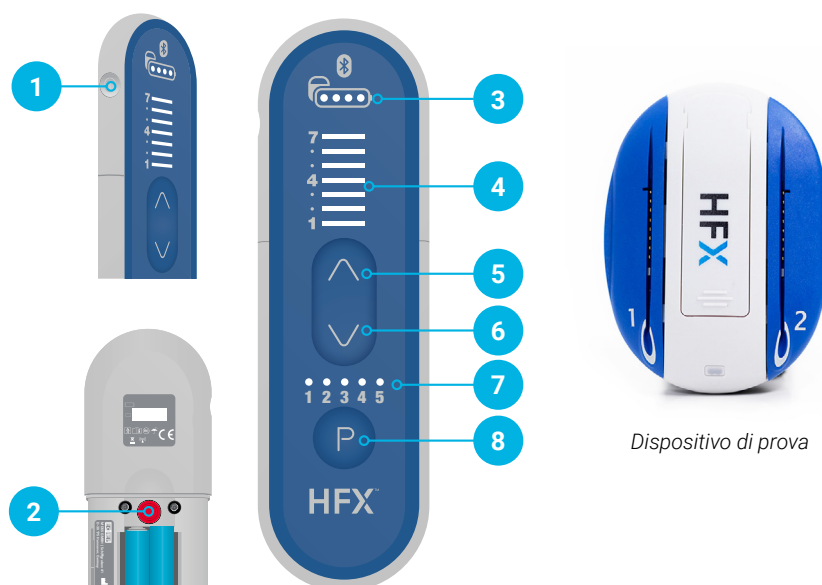

Dispositivo di prova

Guida all'uso del dispositivo di prova

Durante il periodo di prova, tenga il telecomando a poca distanza dal dispositivo di prova, poiché i due dispositivi comunicano e il telecomando emette un segnale acustico ripetuto in caso di elettrocatetere allentato.

- Il dispositivo di prova trasmette la stimolazione agli elettrocateteri.
- Lei potrà modificare la stimolazione tramite il telecomando.
- Mantenga asciutto il dispositivo di prova.
- Eviti di interagire direttamente con lo stimolatore di prova, ad esempio di toccarlo o di esercitare pressione su di esso, perché così facendo potrebbe far allentare lo stimolatore di prova fissato al corpo.
- Verifichi due volte al giorno la spia dell'indicatore di livello della stimolazione per accertare che la stimolazione sia attiva.

Accensione del telecomando

Tenere premuto il pulsante laterale ● finché non viene emesso un segnale acustico lungo.

- Potrebbe essere necessario tenere premuto ● anche per 5 secondi.
- Se il telecomando si sincronizza con il dispositivo di prova, si accenderà almeno una spia sul telecomando.
- Se il telecomando non si sincronizza con il dispositivo di prova, vengono emessi 3 segnali acustici e le spie sul telecomando si spengono.
- Ripetere questi passaggi finché non si ottiene la comunicazione con il dispositivo di prova. Avvicinare il telecomando al dispositivo per agevolare la comunicazione.
- Gli altri pulsanti del telecomando rispondono solo quando il telecomando è acceso e collegato al dispositivo di prova.


Spegnimento del telecomando


Premere il pulsante laterale ● per spegnere il telecomando.


- La stimolazione continua anche quando il telecomando è spento.
- Il telecomando si spegne automaticamente dopo 2 minuti di inattività.

Attivazione della stimolazione e modifica del programma

Per attivare la stimolazione, assicurarsi che il telecomando sia acceso.

- Normalmente, la stimolazione è attivata, a meno che non sia stata disattivata deliberatamente.
- Se l'indicatore del livello di stimolazione non è acceso, la stimolazione è disattivata. Premere  una volta per attivare la stimolazione al livello predeterminato.
- Quando la stimolazione viene attivata (dopo che era stata disattivata), il dispositivo di prova si trova al livello di avvio dell'ultimo programma attivo utilizzato.

Per modificare il programma, premere il pulsante di selezione del programma .



- Premere ripetutamente  finché la spia non si trova sul numero di programma desiderato.
- Una volta selezionato il programma desiderato, non premere alcun pulsante finché la spia non smette di lampeggiare. Il telecomando emette 1 segnale acustico, a conferma dell'impostazione del nuovo programma. Verificare che la spia sopra il numero di programma desiderato presenti un'illuminazione fissa.
- Se il telecomando emette 3 segnali acustici e l'indicatore del programma torna al programma precedente, significa che il programma non è stato cambiato correttamente. Avvicinare il telecomando al dispositivo di prova e ripetere i passaggi precedenti.

Modifica del livello di stimolazione

Accendere il telecomando prima di regolare il livello di stimolazione.


Premere  per aumentare il livello di stimolazione.

Premere  per ridurlo.

- Ogni volta che viene premuto  o , viene emesso 1 segnale acustico.
- Il livello di stimolazione viene visualizzato sull'apposito indicatore.
- Quando il livello di stimolazione per il programma selezionato è al massimo o al minimo e si tenta di passare al livello superiore o inferiore, vengono emessi 2 segnali acustici a indicare che è stato raggiunto il limite attualmente programmato.

Disattivazione della stimolazione

Una volta acceso il telecomando, premere  sotto lo sportello della batteria per disattivare la stimolazione.

- Le spie dell'indicatore del livello di stimolazione si spengono quando la stimolazione è disattivata.
- Il pulsante  può solo disattivare la stimolazione, non attivarla.

Sostituzione delle batterie



Sostituire le batterie del telecomando nei seguenti casi:

- Il telecomando emette 6 segnali acustici al momento dell'accensione.
- Il telecomando non si accende.

Il telecomando utilizza solo 2 batterie alcaline AAA. NON UTILIZZARE batterie al litio o ricaricabili.

Se l'indicatore del livello della batteria scende a 2 punti o meno, significa che le batterie del dispositivo di prova si stanno scaricando.


Se il telecomando emette un segnale acustico 10 volte all'accensione, la batteria del dispositivo di prova è completamente scarica e la stimolazione è stata disattivata. Contattare il medico per fissare un appuntamento per la sostituzione della batteria.

Segnale acustico emesso	Segnale visualizzato	Significato	Cosa fare
Segnale acustico continuo per 60 secondi	<p>Tutte le spie dell'indicatore del livello di stimolazione lampeggiano</p> 	Potrebbe esserci un collegamento allentato tra un elettrocateretere e il dispositivo di prova.	<p>Per disattivare il segnale acustico e il lampeggiamento, tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per un massimo di cinque secondi.</p> <p>Contattare il medico.</p>
Segnale acustico continuo per 60 secondi	<p>Tutte le spie del livello della batteria lampeggiano</p> 	La batteria del dispositivo di prova è quasi o completamente scarica.	<p>Per disattivare il segnale acustico, tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per un massimo di cinque secondi. Le spie della batteria continueranno a lampeggiare.</p> <p>Contattare il medico.</p>

Come usare il telecomando (PTRC3000/PTRC2500)

Per pazienti in fase di impianto

1. Pulsante di accensione/spegnimento del telecomando
2. Pulsante di disattivazione della stimolazione
3. Indicatore del livello della batteria (livello di carica del dispositivo impiantato)
4. Spie dell'indicatore di livello della stimolazione
5. Pulsante di avvio/aumento della stimolazione
6. Pulsante di riduzione della stimolazione
7. Indicatore del programma
8. Pulsante di selezione del programma

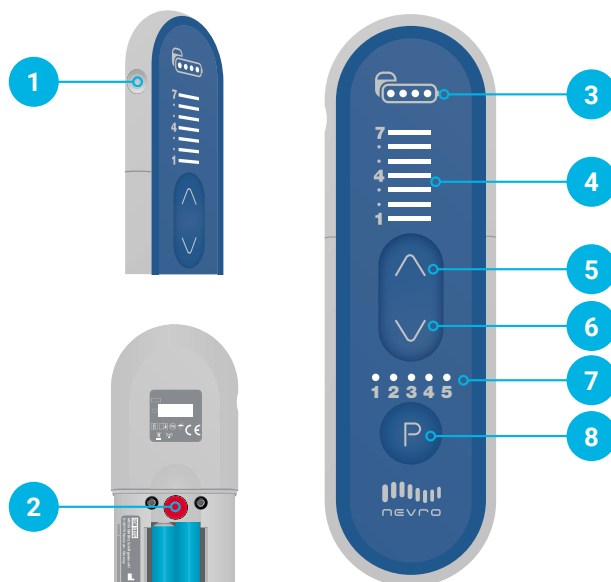

Consigli

Sostituire le batterie del telecomando nei seguenti casi:

- Il telecomando emette 6 segnali acustici al momento dell'accensione.
- Il telecomando non si accende.
- Sono trascorsi 3 mesi dalla sostituzione delle batterie.

Per ricevere un sollievo ottimale e identificare i programmi più adatti al Suo caso, rimanga in stretto contatto con il team di assistenza Nevro HFX, che Le fornirà le istruzioni su come e quando utilizzare il telecomando.

Il telecomando utilizza solo 2 batterie alcaline AAA.

NON UTILIZZARE batterie al litio o ricaricabili.

Quando l'indicatore del livello della batteria mostra 2 puntini o meno, è necessario ricaricare la batteria del dispositivo impiantato utilizzando il caricabatterie.

Le istruzioni video sono disponibili all'indirizzo www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/.

Accensione del telecomando

Tenere premuto il pulsante laterale ● finché non viene emesso un segnale acustico lungo.

- Potrebbe essere necessario tenere premuto ● anche per 5 secondi.
- Se il telecomando si sincronizza con il dispositivo impiantato, si accenderà almeno una spia sul telecomando.
- Se il telecomando non si sincronizza con il dispositivo impiantato, vengono emessi 3 segnali acustici e le spie sul telecomando si spengono.
- Ripetere questi passaggi finché non si ottiene la comunicazione con il dispositivo impiantato. Avvicinare il telecomando al dispositivo impiantato per agevolare la comunicazione.
- Gli altri pulsanti del telecomando rispondono solo quando il telecomando è acceso e collegato al dispositivo impiantato.

Spegnimento del telecomando

Premere il pulsante laterale ● per spegnere il telecomando.

- La stimolazione continua anche quando il telecomando è spento.
- Il telecomando si spegne automaticamente dopo 2 minuti di inattività.

Attivazione della stimolazione e modifica del programma

Per attivare la stimolazione, assicurarsi che il telecomando sia acceso.

- Normalmente, la stimolazione è attivata, a meno che non sia stata disattivata deliberatamente.
- Se l'indicatore del livello di stimolazione non è acceso, la stimolazione è disattivata. Premere ▲ una volta per attivare la stimolazione al livello predeterminato.
- Quando la stimolazione viene attivata (dopo essere stata disattivata), il dispositivo impiantato è impostato al livello di avvio dell'ultimo programma attivo utilizzato.

Per modificare il programma, premere il pulsante di selezione del programma P.

- Premere ripetutamente P finché la spia non si trova sul numero di programma desiderato.
- Una volta selezionato il programma desiderato, non premere alcun pulsante finché la spia non smette di lampeggiare. Il telecomando emette 1 segnale acustico, a conferma dell'impostazione del nuovo programma. Verificare che la spia sopra il numero di programma desiderato presenti un'illuminazione fissa.
- Se il telecomando emette 3 segnali acustici e l'indicatore del programma torna al programma precedente, il programma non è stato modificato correttamente. Avvicinare il telecomando al dispositivo impiantato e ripetere i passaggi precedenti.

Modifica del livello di stimolazione

Accendere il telecomando prima di regolare il livello di stimolazione.

Premere ▲ per aumentare il livello di stimolazione.

Premere ▼ per ridurlo.


- Ogni volta che viene premuto ▲ o ▼, viene emesso un segnale acustico.
- Il livello di stimolazione viene visualizzato sull'apposito indicatore.
- Quando il livello di stimolazione per il programma selezionato è al massimo o al minimo e si tenta di passare al livello superiore o inferiore, vengono emessi 2 segnali acustici a indicare che è stato raggiunto il limite attualmente programmato.

Come cambiare gruppo

Prima di accedere a queste impostazioni del telecomando, contattare il team di assistenza Nevro HFX.

- Per entrare nella modalità di cambio gruppo, tenere premuto il pulsante P per almeno 3 secondi. La spia lampeggiante sopra ▲ indica il numero del gruppo attualmente in uso. Usare ▲ o ▼ per spostarsi sul numero del gruppo desiderato.
- Per confermare il passaggio al nuovo gruppo, tenere premuto P nuovamente per almeno 3 secondi. La modifica è confermata da un segnale acustico lungo. Il telecomando esce quindi automaticamente dalla modalità di cambio gruppo. Se non si conferma la modifica del numero di gruppo entro 60 secondi, le modifiche non verranno salvate.
- Il telecomando mostrerà il numero di gruppo attualmente in uso nel momento in cui si cambia programma. Per attivare il cambio di programma, premere P una volta. Il numero illuminato indica il numero di gruppo attualmente in uso. Premere P una seconda volta per passare al programma successivo.

Esempio: il telecomando mostra Gruppo 1 - Programma 1

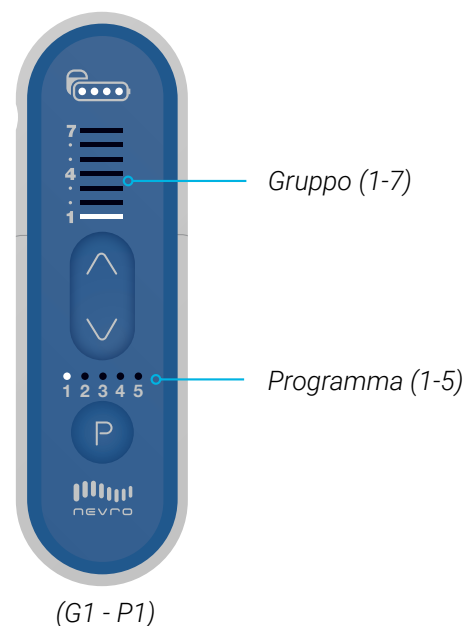


Disattivazione della stimolazione

Una volta acceso il telecomando, premere ● sotto lo sportello della batteria per disattivare la stimolazione.

- Le spie dell'indicatore del livello di stimolazione si spengono quando la stimolazione è disattivata.
- Il pulsante ● può solo disattivare la stimolazione, non attivarla.

Come usare il telecomando (PTRC2300) Per pazienti in fase di impianto

1. Pulsante di accensione/spegnimento del telecomando
2. Pulsante di disattivazione della stimolazione
3. Indicatore del livello della batteria (livello di carica del dispositivo impiantato)
4. Spie dell'indicatore di livello della stimolazione
5. Pulsante di avvio/aumento della stimolazione
6. Pulsante di riduzione della stimolazione
7. Indicatore del programma
8. Pulsante di selezione del programma

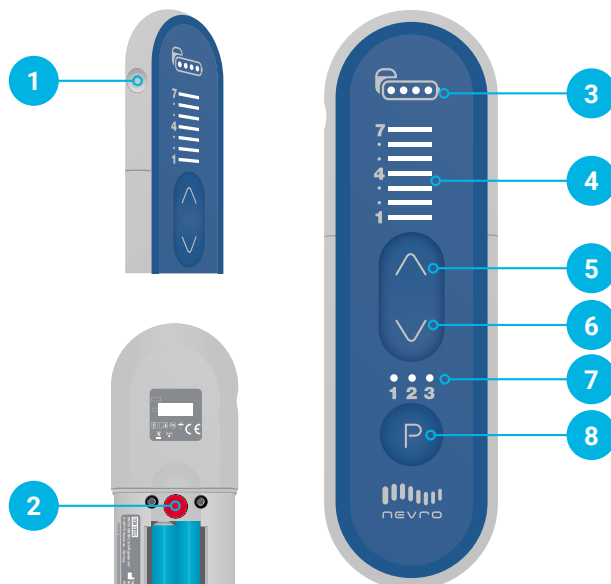

Consigli

Sostituire le batterie del telecomando nei seguenti casi:

- Il telecomando emette 6 segnali acustici al momento dell'accensione.
- Il telecomando non si accende.
- Sono trascorsi 3 mesi dalla sostituzione delle batterie.

Per ricevere un sollievo ottimale e identificare i programmi più adatti al Suo caso, rimanga in stretto contatto con il team di assistenza Nevro HFX, che Le fornirà le istruzioni su come e quando utilizzare il telecomando.

Il telecomando utilizza solo 2 batterie alcaline AAA.

NON UTILIZZARE batterie al litio o ricaricabili.

Quando l'indicatore del livello della batteria mostra 2 puntini o meno, è necessario ricaricare la batteria del dispositivo impiantato utilizzando il caricabatterie.

Le istruzioni video sono disponibili all'indirizzo www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/.

Accensione del telecomando

Tenere premuto il pulsante laterale ● finché non viene emesso un segnale acustico lungo.

- Potrebbe essere necessario tenere premuto ● anche per 5 secondi.
- Se il telecomando si sincronizza con il dispositivo impiantato, si accenderà almeno un LED sul telecomando.
- Se il telecomando non si sincronizza con il dispositivo impiantato, vengono emessi 3 segnali acustici e le spie sul telecomando si spengono.
- Ripetere questi passaggi finché non si ottiene la comunicazione con il dispositivo impiantato. Avvicinare il telecomando al dispositivo impiantato per agevolare la comunicazione.
- Gli altri pulsanti del telecomando rispondono solo quando il telecomando è acceso e collegato al dispositivo impiantato.


Spegnimento del telecomando


Premere il pulsante laterale  per spegnere il telecomando.


- La stimolazione continua anche quando il telecomando è spento.
- Il telecomando si spegne automaticamente dopo 2 minuti di inattività.

Attivazione della stimolazione e modifica del programma

Per attivare la stimolazione, assicurarsi che il telecomando sia acceso.


- Normalmente, la stimolazione è attivata, a meno che non sia stata disattivata deliberatamente.
- Se l'indicatore del livello di stimolazione non è acceso, la stimolazione è disattivata. Premere  una volta per attivare la stimolazione al livello predeterminato.
- Quando la stimolazione viene attivata (dopo essere stata disattivata), il dispositivo impiantato si trova al livello di avvio dell'ultimo programma attivo utilizzato.

Per modificare il programma, premere il pulsante di selezione del programma .



- Premere ripetutamente  finché la spia non si trova sul numero di programma desiderato.
- Una volta selezionato il programma desiderato, non premere alcun pulsante finché la spia non smette di lampeggiare. Il telecomando emette 1 segnale acustico, a conferma dell'impostazione del nuovo programma. Verificare che la spia sopra il numero di programma desiderato presenti un'illuminazione fissa.
- Se il telecomando emette 3 segnali acustici e l'indicatore del programma torna al programma precedente, significa che il programma non è stato cambiato correttamente. Avvicinare il telecomando al dispositivo impiantato e ripetere i passaggi precedenti.

Modifica del livello di stimolazione

Accendere il telecomando prima di regolare il livello di stimolazione.


Premere  per aumentare il livello di stimolazione.

Premere  per ridurlo.

- Ogni volta che viene premuto  o , viene emesso un segnale acustico.
- Il livello di stimolazione viene visualizzato sull'apposito indicatore.
- Quando il livello di stimolazione per il programma selezionato è al massimo o al minimo e si tenta di passare al livello superiore o inferiore, vengono emessi 2 segnali acustici a indicare che è stato raggiunto il limite attualmente programmato.


Disattivazione della stimolazione

Una volta acceso il telecomando, premere  sotto lo sportello della batteria per disattivare la stimolazione.

- Le spie dell'indicatore del livello di stimolazione si spengono quando la stimolazione è disattivata.
- Il pulsante  può solo disattivare la stimolazione, non attivarla.

Come usare il telecomando (PTRC1000) Per pazienti in fase di impianto

1. Pulsante di accensione/spengimento del telecomando
2. Indicatore del livello di stimolazione
3. Indicatore del programma
4. Pulsante di selezione del programma
5. Pulsante di disattivazione della stimolazione
6. Pulsante di avvio/aumento della stimolazione
7. Pulsante di riduzione della stimolazione
8. Indicatore del livello della batteria
(livello di carica del dispositivo di prova o dell'impianto)

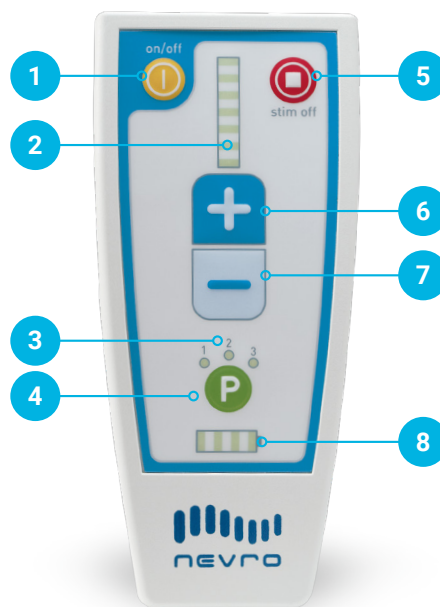

Consigli

Le istruzioni su come usare il telecomando Le saranno fornite dal team di assistenza Nevro HFX. È possibile che la programmazione del dispositivo non debba essere modificata in alcun modo durante il periodo di prova. Per ottenere un sollievo ottimale, rimanga in stretto contatto con il team di assistenza Nevro HFX.


Sostituire le batterie del telecomando nei seguenti casi:


- Il telecomando emette 6 segnali acustici al momento dell'accensione.
- Il telecomando non si accende.

Il telecomando utilizza solo 2 batterie alcaline AA. NON UTILIZZARE batterie al litio o ricaricabili.

Se l'indicatore del livello della batteria scende a 2 punti o meno, significa che le batterie del dispositivo di prova devono essere sostituite. Vedere la guida del dispositivo di prova.



Accensione del telecomando

Tenere premuto  finché non si accendono le spie e non viene emesso un segnale acustico.

- Potrebbe essere necessario tenere premuto  anche per 5 secondi.
- Se il telecomando comunica con il dispositivo di prova o con l'impianto, si accenderà l'indicatore del programma (1, 2 o 3). Si accendono inoltre le spie dell'indicatore del livello di stimolazione che indicano che la stimolazione è attiva.
- Se il telecomando non riesce a comunicare con il dispositivo di prova o con l'impianto, vengono emessi 3 segnali acustici e le spie sul telecomando si spengono.
- Ripetere questi passaggi finché non si ottiene la comunicazione con il dispositivo di prova o con l'impianto. Avvicinare il telecomando al dispositivo di prova o all'impianto per agevolare la comunicazione.
- Gli altri pulsanti del telecomando rispondono solo quando il telecomando è acceso e collegato al dispositivo di prova o al telecomando.

Spegnimento del telecomando

Premere  per spegnere il telecomando.

- La stimolazione continua anche quando il telecomando è spento.
- NON premere  per spegnere il telecomando. Questo comando  disattiva la stimolazione.
- Il telecomando si spegne automaticamente dopo 2 minuti di inattività.

Disattivazione della stimolazione

Una volta acceso il telecomando, premere  per disattivare la stimolazione.


- Le spie dell'indicatore di livello di stimolazione si spengono quando la stimolazione è disattivata.
- Questo pulsante può solo disattivare la stimolazione, non attivarla.

Attivazione della stimolazione e modifica del programma

Per attivare la stimolazione, premere . Il telecomando deve essere acceso.

- Normalmente, la stimolazione è attivata, a meno che non sia stata disattivata deliberatamente.
- Quando la stimolazione viene attivata (dopo che era stata disattivata), il dispositivo di prova o l'impianto si trova al livello di avvio dell'ultimo programma attivo utilizzato.

Per cambiare programma, premere .



- La spia dell'indicatore del programma inizia a lampeggiare.
- Premere ripetutamente  finché la spia non si trova sul numero di programma desiderato.
- Una volta selezionato il programma desiderato, non premere alcun pulsante finché la spia non smette di lampeggiare. Il telecomando emette un lungo segnale acustico a conferma dell'impostazione del nuovo programma. Verificare che la spia sopra il numero di programma desiderato presenti un'illuminazione fissa.
- Se il telecomando emette 3 segnali acustici e l'indicatore del programma torna al programma precedente, il programma non è stato modificato correttamente. Avvicinare il telecomando al dispositivo di prova o all'impianto e ripetere i passaggi precedenti.

Modifica del livello di stimolazione

Accendere il telecomando prima di regolare il livello di stimolazione.

Premere  per aumentare il livello di stimolazione.

Premere  per ridurlo.

- Ogni volta che viene premuto  o , viene emesso 1 segnale acustico.
- Il livello di stimolazione viene visualizzato sull'apposito indicatore.
- Quando il livello di stimolazione per il programma selezionato è al massimo o al minimo e si tenta di passare al livello superiore o inferiore, vengono emessi 2 segnali acustici a indicare che è stato raggiunto il limite attualmente programmato.

Come usare il caricabatterie (CHGR2500) Per pazienti in fase di impianto


1. Bobina di ricarica
2. Porta dell'adattatore di corrente
3. Indicatore del livello della batteria del caricabatterie
4. Pulsante di avvio della ricarica
5. Indicatore dell'intensità del segnale dell'antenna
6. Indicatore del livello della batteria del dispositivo impiantato



Consigli


I tempi di ricarica possono variare per ogni sessione in base a fattori quali la frequenza di ricarica e le impostazioni di stimolazione.

Se la bobina di ricarica ha un collegamento inadeguato, come indicato dagli indicatori circolari dell'intensità del segnale dell'antenna, riposizionare lentamente la bobina e attendere 3 secondi. Gli indicatori circolari dell'intensità del segnale dell'antenna potrebbero impiegare fino a 3 secondi per aggiornare la nuova posizione della bobina di ricarica. Ripetere secondo necessità.

Se il tempo di ricarica è più breve del previsto, il dispositivo impiantato potrebbe essere stato spento. Accertarsi di accenderlo con il telecomando. La stimolazione è attiva se sono illuminate le spie sopra la freccia .

Promemoria importanti

L'impianto è in grado di erogare la stimolazione anche durante la ricarica.

Non ricaricare il dispositivo impiantato mentre il caricabatterie è inserito in una presa a muro. Rimuovere sempre l'adattatore di corrente prima di premere il pulsante di avvio della ricarica . Scollegare l'adattatore di corrente dalla parete ogni volta che si usa il caricabatterie sull'impianto. Una volta terminata la ricarica, inserire di nuovo il caricabatterie nell'adattatore di corrente e quindi l'adattatore di corrente nella presa a muro in modo che il caricabatterie sia pronto per la sessione di ricarica successiva.

Ricaricare il dispositivo impiantato regolarmente per sviluppare una routine facile da ricordare.

Durante la carica, il sito dell'impianto potrebbe riscaldarsi. Se si avverte dolore o fastidio, interrompere la ricarica e contattare il medico o il team di assistenza Nevro HFX.


Utilizzare il telecomando per verificare che la stimolazione sia attiva. Se i tempi di ricarica aumentano notevolmente, informare il medico o il team di assistenza Nevro HFX.

Le istruzioni video sono disponibili all'indirizzo www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/.


Preparazione per la ricarica


Posizionare il centro della bobina di ricarica circolare sulla parte superiore del dispositivo impiantato.

- La figura seguente mostra che la parte superiore del dispositivo impiantato (nella casella gialla) è al centro della bobina di ricarica.

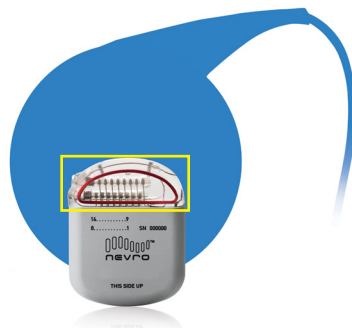

Inizio della ricarica

Premere il pulsante di avvio della ricarica  per accendere il caricabatterie. La spia sul lato del dispositivo (indicatore del livello della batteria del caricabatterie) si accenderà per confermare che il caricabatterie è acceso. Il caricabatterie inizierà a emettere un segnale acustico e cercherà il dispositivo impiantato.

1. Il segnale acustico prosegue finché il caricabatterie non si collega al dispositivo impiantato.
2. Se trascorrono 10 secondi senza che si stabilisca il collegamento, il caricabatterie emetterà un lungo segnale acustico e si spegnerà. Riposizionare la bobina di ricarica e premere di nuovo il pulsante di avvio della ricarica .
3. Quando compare almeno un cerchio acceso sull'indicatore dell'intensità del segnale dell'antenna, il collegamento è stato stabilito. Un numero maggiore di cerchi indica un collegamento migliore, con minore probabilità di interruzione della ricarica a causa di movimenti. Se è acceso solo il puntino centrale, la connessione è scadente e caricabatterie e dispositivo impiantato non si collegheranno.
4. Se il caricabatterie è nella posizione corretta, l'indicatore del livello della batteria dell'IPG si accende.



Se il collegamento non è stato stabilito, è inadeguato o si è interrotto, riposizionare lentamente la bobina di ricarica blu e ripetere i passaggi precedenti.

Ricarica

La ricarica è in corso quando l'indicatore del livello della batteria dell'IPG e i cerchi dell'indicatore dell'intensità del segnale dell'antenna sono accesi. Durante la ricarica, il numero di puntini accesi sull'indicatore del livello della batteria dell'IPG aumenta.

- Se il collegamento è andato perso, il caricabatterie emette un segnale acustico. Riposizionare la bobina di ricarica e ripetere i passaggi indicati alla sezione "Inizio della ricarica".

Completamento della ricarica

Una volta completata la ricarica, verrà emesso un segnale acustico lungo e il caricabatterie si spegnerà automaticamente. Non è presente un pulsante di spegnimento sul caricabatterie. Controllare il livello della batteria del dispositivo impiantato per accertarsi che la batteria sia stata completamente ricaricata (quattro puntini).

Utilizzare il telecomando per verificare che il dispositivo impiantato sia acceso.

Collegare il caricabatterie alla presa a muro per assicurarsi che sia pronto per la sessione di ricarica successiva.

- Per inserire il caricabatterie nella presa a muro, collegare l'adattatore di corrente all'apposita porta del caricabatterie, quindi inserire l'adattatore di corrente stesso nella presa a muro. La spia arancione indica che il caricabatterie è in fase di ricarica. La ricarica è completa quando la spia arancione si spegne.



Uso della cintura del caricabatterie


Una volta identificato il punto in cui posizionare la bobina di ricarica per ottenere un buon collegamento con il dispositivo impiantato, utilizzare la cintura del caricabatterie per fissare la bobina di ricarica sul corpo prima della ricarica.

1. Posizionare la bobina di ricarica blu nella custodia sulla cintura del caricabatterie e fissare saldamente la cintura intorno alla vita. Utilizzare la chiusura a strappo accanto alla custodia per fissare il cavo della bobina di ricarica.
2. Avviare la ricarica e spostare la bobina di ricarica finché non si collega con il dispositivo impiantato.
3. Se si desidera una maggiore libertà di movimento durante la ricarica, inserire il caricabatterie nel relativo fodero, quindi fissare il fodero alla cintura o ai pantaloni.




Come usare il caricabatterie (CHGR1000) Per pazienti in fase di impianto

1. Bobina di ricarica
2. Indicatore del livello della batteria del caricabatterie
3. Indicatore dell'intensità del segnale dell'antenna
4. Pulsante di disattivazione della stimolazione
5. Pulsante di avvio della ricarica
6. Porta dell'adattatore di corrente
7. Indicatore del livello della batteria del dispositivo impiantato

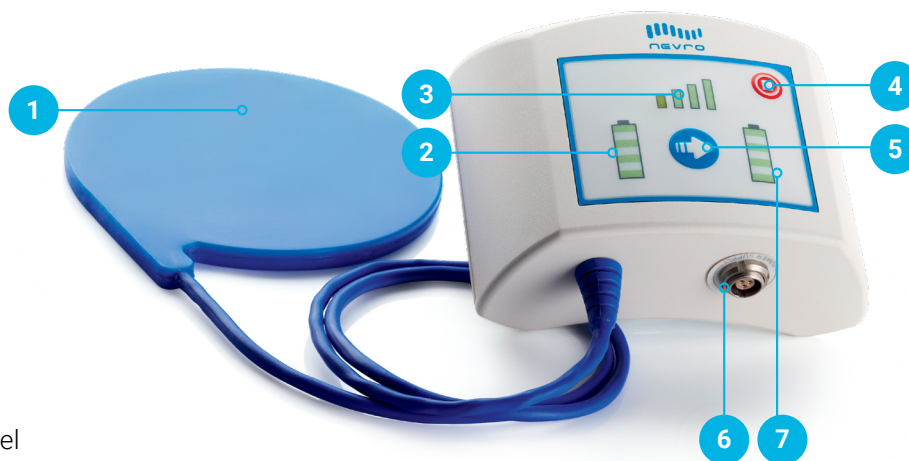

Consigli

Non premere  a meno che non si desideri disattivare la stimolazione. Per attivare la stimolazione, usare il telecomando.

I tempi di ricarica possono variare per ogni sessione in base a fattori quali la frequenza di ricarica e le impostazioni di stimolazione.

Se la bobina di ricarica ha un collegamento inadeguato, come indicato dall'indicatore di potenza dell'antenna, riposizionare lentamente la bobina e attendere 3 secondi. Il display dell'indicatore di potenza dell'antenna potrebbe impiegare fino a 3 secondi per aggiornare la nuova posizione della bobina di ricarica. Ripetere secondo necessità.

Se il tempo di ricarica è più breve del previsto, il dispositivo impiantato potrebbe essere stato spento. Accertarsi di accenderlo con il telecomando.

Promemoria importanti

Non ricaricare il dispositivo impiantato mentre il caricabatterie è inserito in una presa a muro. Rimuovere sempre l'adattatore di corrente prima di premere il pulsante di avvio della ricarica.

Ricaricare il dispositivo impiantato regolarmente per sviluppare una routine facile da ricordare.

Durante la carica, il sito dell'impianto potrebbe riscaldarsi. Se si avverte dolore o fastidio, interrompere la ricarica e contattare il medico o il team di assistenza Nevro HFX.

Una volta ricaricato il dispositivo impiantato, inserire il caricabatterie nella presa a muro in modo che sia pronto per la sessione di ricarica successiva.

Utilizzare il telecomando dopo la ricarica per verificare che la stimolazione sia attivata. Se i tempi di ricarica aumentano notevolmente, informare il team di assistenza Nevro HFX.

Le istruzioni video sono disponibili all'indirizzo www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/.

Preparazione per la ricarica

Posizionare il centro della bobina di ricarica circolare sulla parte superiore del dispositivo impiantato.

- La figura 1 mostra che la parte superiore del dispositivo impiantato (nella casella gialla) è al centro della bobina di ricarica.
- La figura 2 mostra un dispositivo impiantato appena sotto la vita. Il dispositivo impiantato in uso potrebbe trovarsi in una posizione diversa, ad esempio sul lato anteriore del corpo, nell'addome (non illustrato).

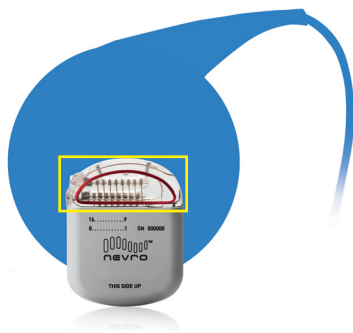


Figura 1

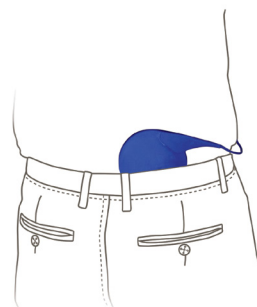



Figura 2

Inizio della ricarica

Tenere premuto  finché non viene emesso il segnale acustico, quindi rilasciarlo.

1. Il segnale acustico e il lampeggiamento delle spie verdi continuano finché il caricabatterie non si collega al dispositivo impiantato.
2. Se trascorrono 10-12 secondi senza che si stabilisca il collegamento, il dispositivo di ricarica emette un lungo segnale acustico e si spegne. Riposizionare la bobina di ricarica e tenere nuovamente premuto .
3. Quando le spie si accendono sull'indicatore di potenza dell'antenna, il collegamento è stato stabilito. Un numero maggiore di spie indica un collegamento migliore, con minore probabilità di interruzione della ricarica a causa di movimenti.
4. Se il collegamento è inadeguato o si è interrotto, l'indicatore di potenza dell'antenna visualizza solo una piccola barra arancione ed emette un segnale acustico intermittente.

Se il collegamento non è stato stabilito, è inadeguato o si è interrotto, riposizionare lentamente la bobina di ricarica blu e ripetere i passaggi 1 e 2.

Ricarica

La ricarica è in corso quando le spie lampeggiano sia sull'indicatore del livello della batteria del caricabatterie sia sull'indicatore del livello della batteria del dispositivo impiantato. Durante la ricarica, il numero di spie sull'indicatore del livello della batteria del caricabatterie diminuisce, mentre il numero di spie sull'indicatore del livello della batteria del dispositivo impiantato aumenta.

- Se il collegamento è andato perso, il caricabatterie emette un segnale acustico. Riposizionare la bobina di ricarica blu e ripetere i passaggi 1 e 2.

Completamento della ricarica

Una volta completata la ricarica, viene emesso un segnale acustico lungo e le spie sul dispositivo di ricarica si spengono. Controllare il livello della batteria del dispositivo impiantato per accertarsi che la batteria sia stata completamente ricaricata.

Utilizzare il telecomando per verificare che il dispositivo impiantato sia acceso.

Collegare il caricabatterie alla presa a muro per assicurarsi che sia pronto per la sessione di ricarica successiva.

- Per inserire il caricabatterie nella presa a muro, collegare l'adattatore di corrente all'apposita porta del caricabatterie, quindi inserire l'adattatore di corrente stesso nella presa a muro.
- È possibile mantenere continuamente in carica il caricabatterie: la batteria non viene danneggiata.


Uso della cintura del caricabatterie

Una volta identificato il punto in cui posizionare la bobina di ricarica per ottenere un buon collegamento con il dispositivo impiantato, utilizzare la cintura del caricabatterie per fissare la bobina di ricarica sul corpo prima della ricarica.

1. Posizionare la bobina di ricarica blu nella custodia in rete sulla cintura del caricabatterie e fissare saldamente la cintura intorno alla vita.
2. Avviare la ricarica e spostare la bobina di ricarica finché non si collega con il dispositivo impiantato.
3. Se si desidera una maggiore libertà di movimento durante la ricarica, inserire il caricabatterie nel relativo fodero, quindi fissare il fodero alla cintura o ai pantaloni.

La bobina di ricarica può essere inserita nella custodia in rete attraverso l'apertura posta sulla parte superiore della cintura del caricabatterie

Cintura del caricabatterie
Fodero del caricabatterie

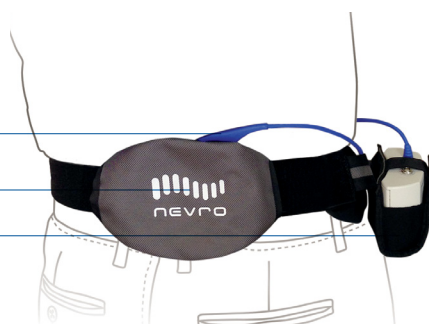

Le istruzioni video sono disponibili all'indirizzo www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/.

Per istruzioni complete su accessori, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al manuale del paziente.

Informazioni importanti. Solo su prescrizione. L'esperienza dei pazienti e l'entità del sollievo dal dolore con il sistema di stimolazione del midollo spinale (SCS) Senza® variano da persona a persona, come pure gli eventi avversi associati all'intervento chirurgico dell'impianto del sistema e al suo utilizzo. I pazienti devono consultare un medico per comprendere i rischi e benefici del trattamento con la SCS. Per informazioni complete, tra cui indicazioni per l'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni ed eventi avversi, fare riferimento al manuale del sistema Senza, consultabile alla pagina www.nevro.com/manuals.